


# RESPONSA PREVENT




## КАК СЕ ИЗПОЛЗВА ПРЕДПАЗНА МАСКА



Измийте ръцете си

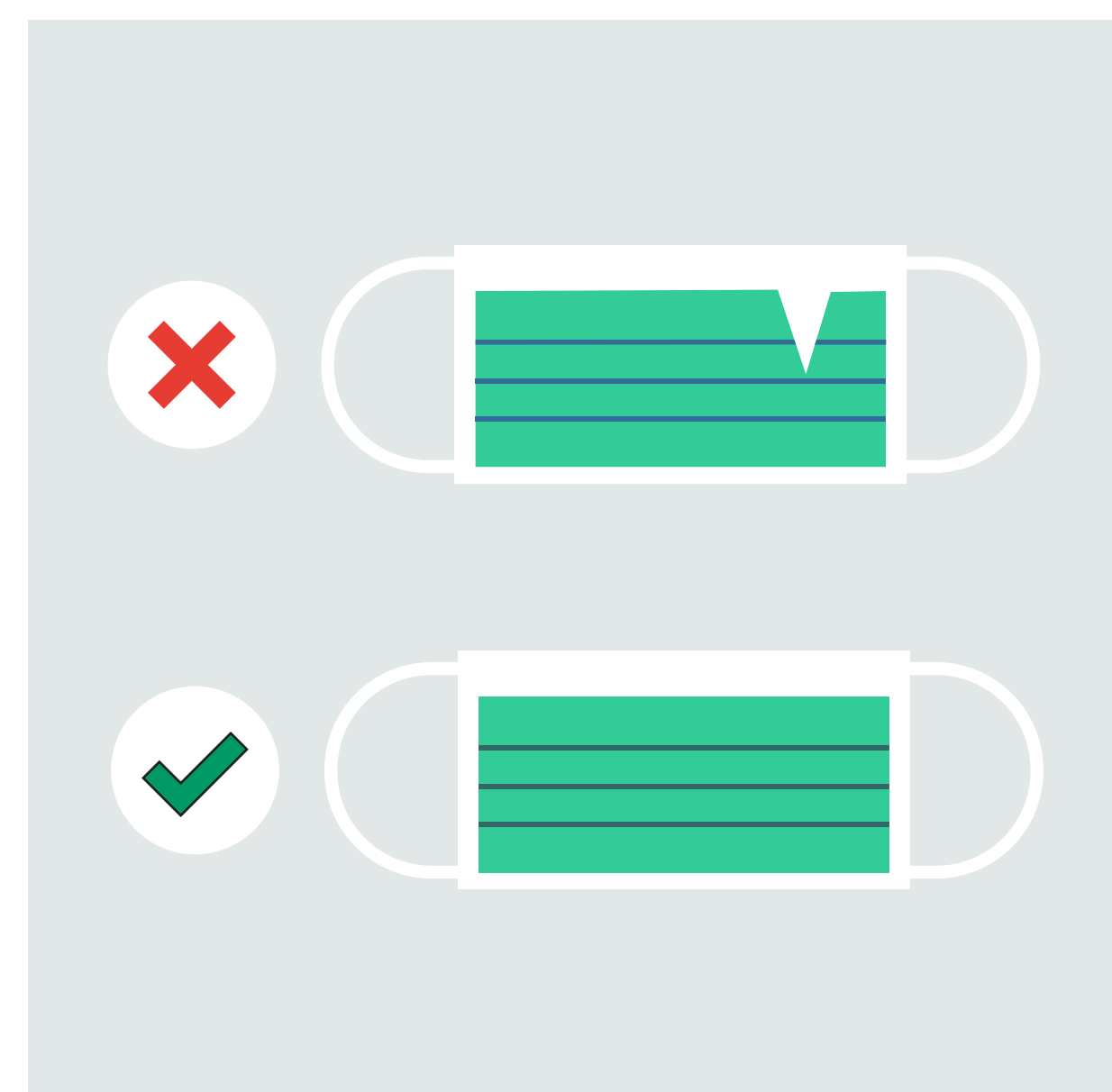


Проверете дали  
маската е здрава

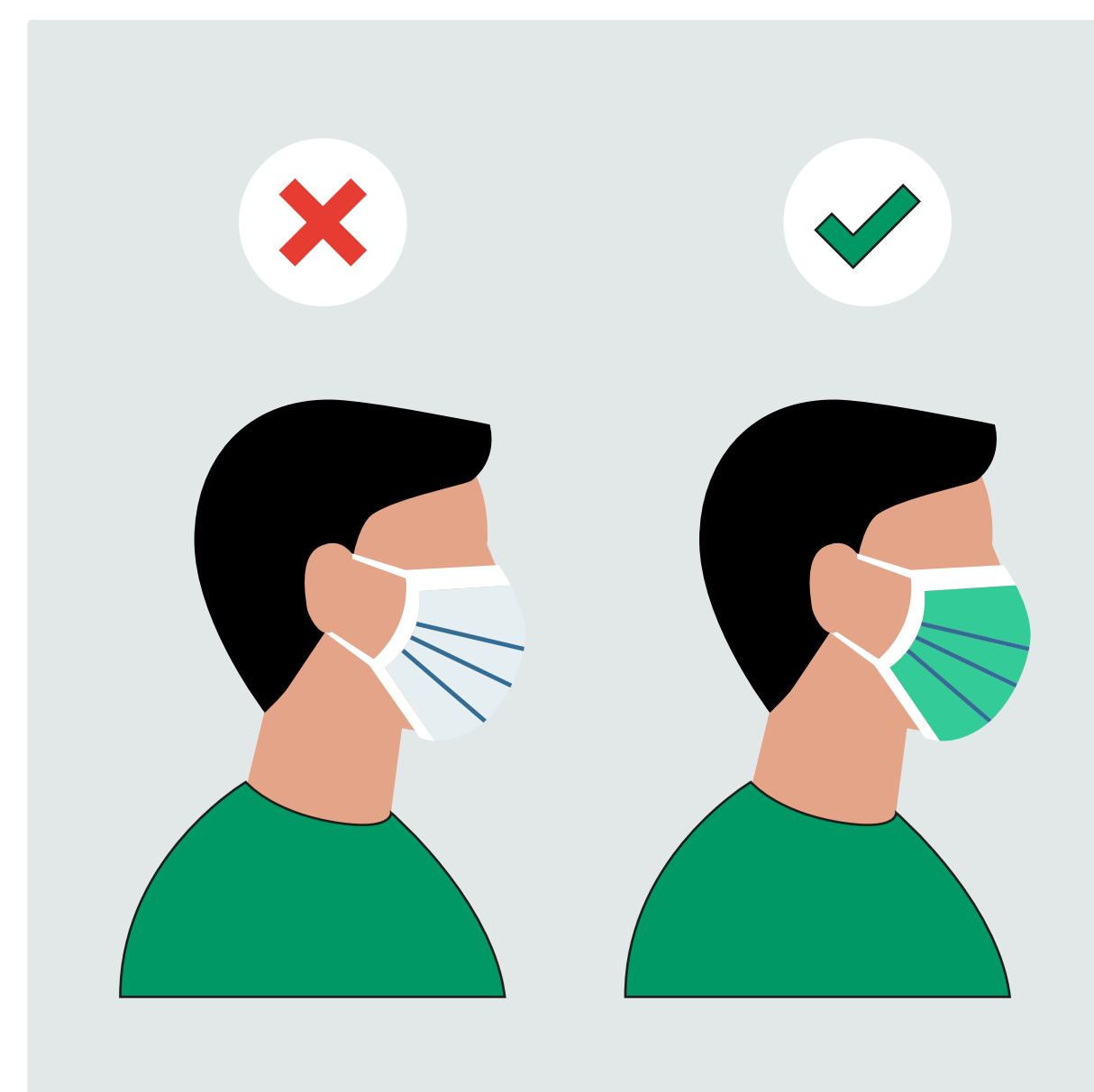


Уверете се, че слагате  
маската правилно



Сложете металната  
пластина на носа

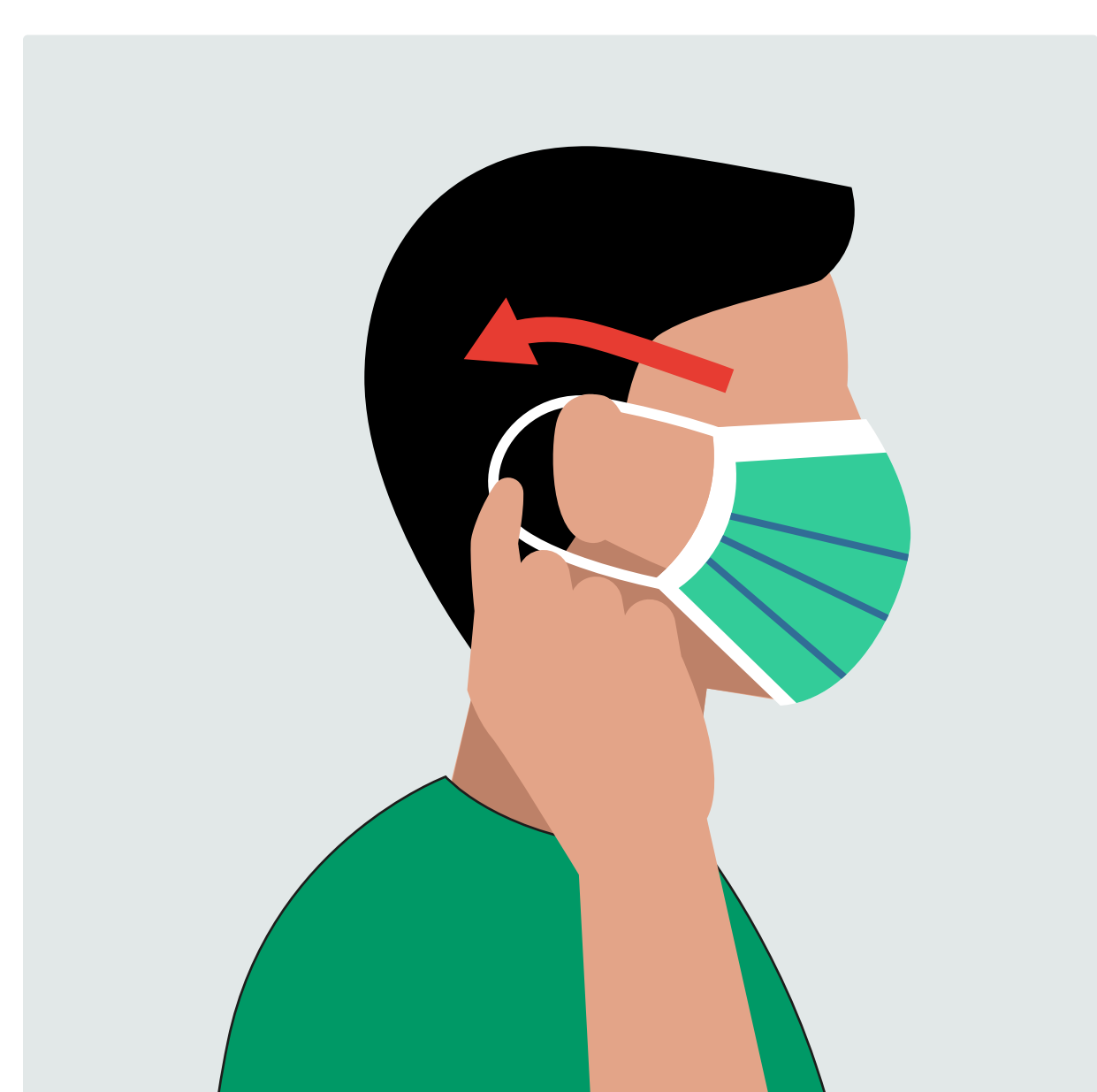


Сложете връвчиците зад  
ушите или зад главата

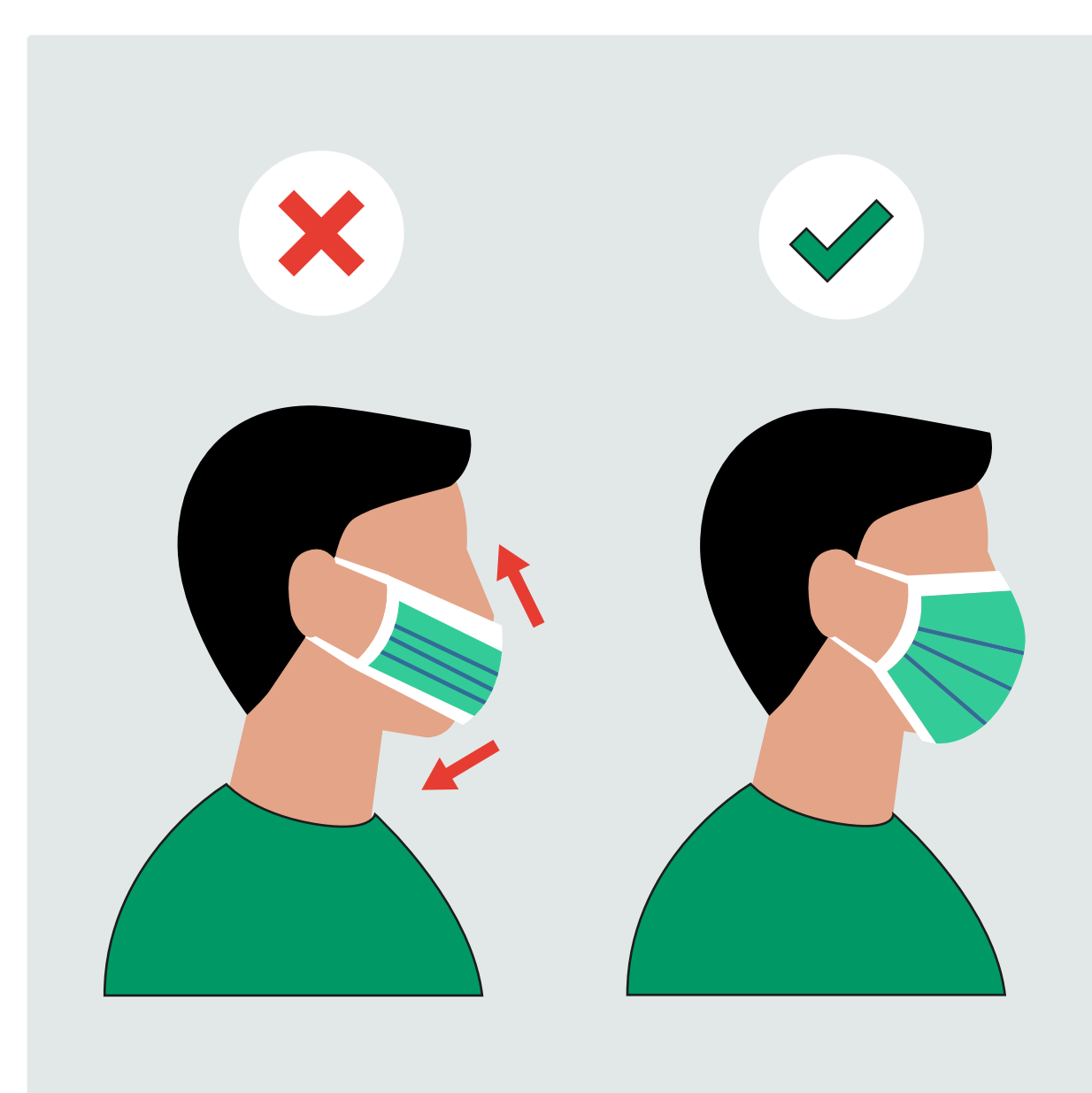

Покрийте плътно  
устата и носа




Нагиснете металната  
пластина за да пасне

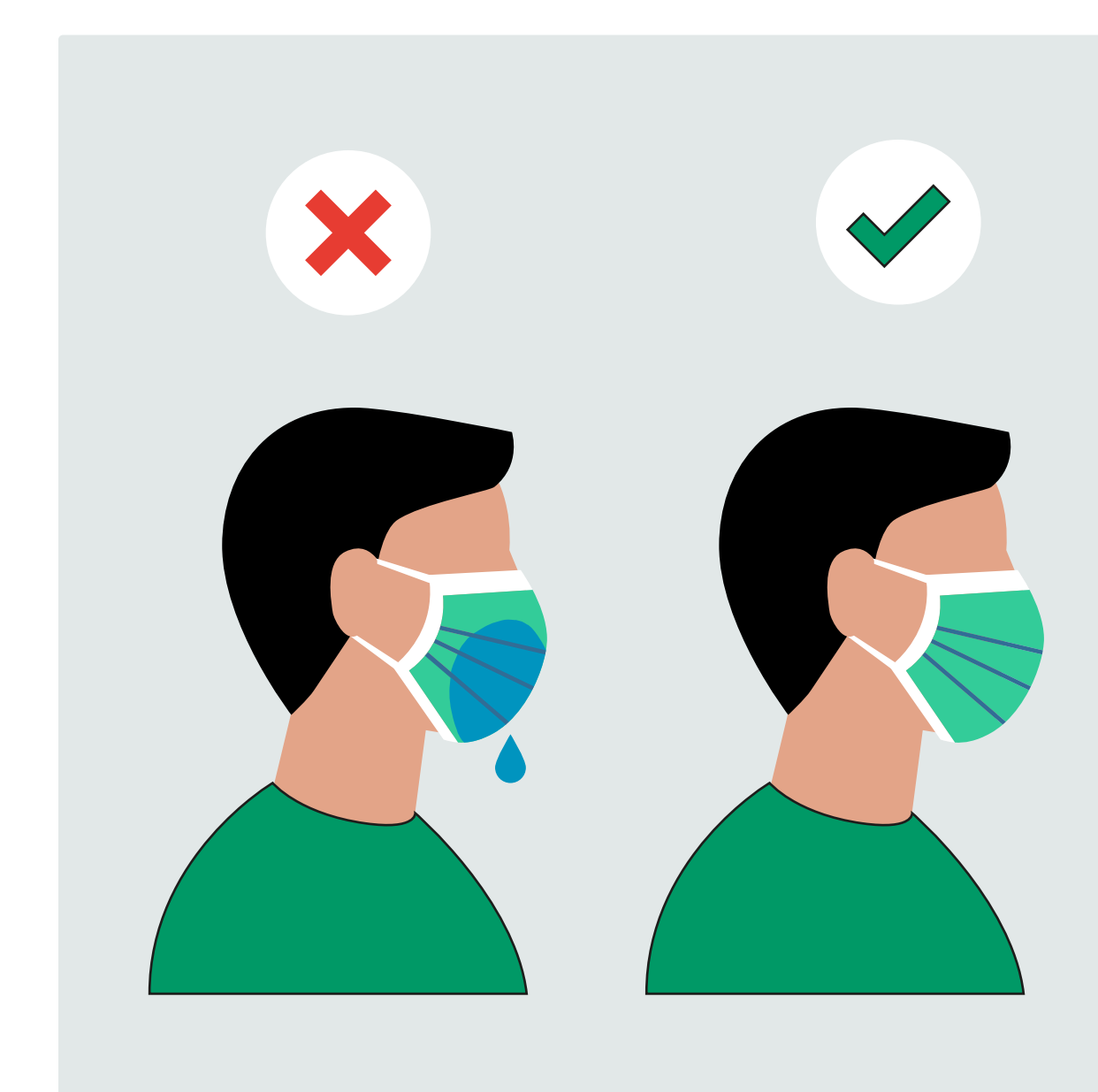

Сменете маската, ако  
се намокри или замърси



Не пипайте маска си

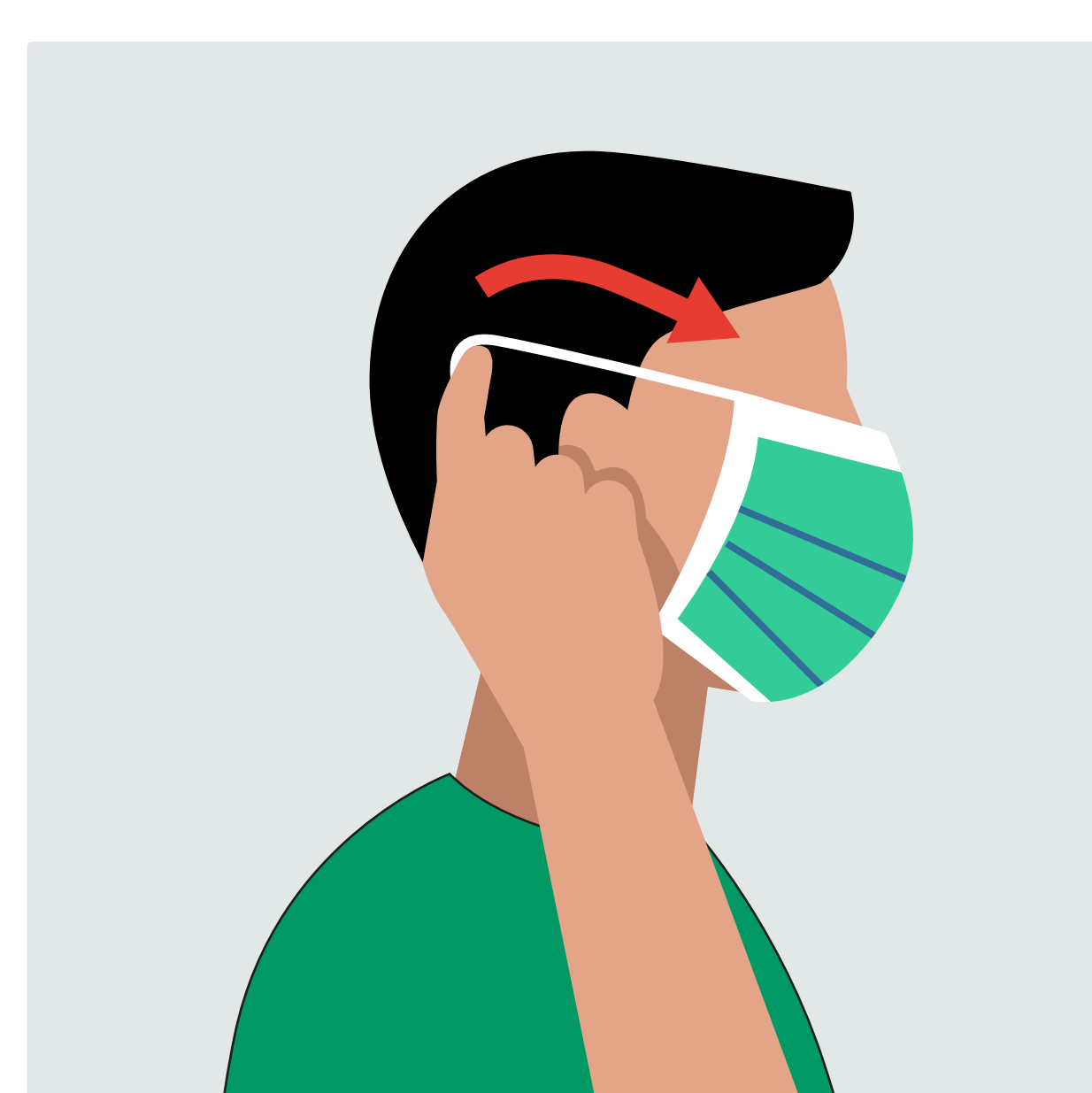

Свалете маската от  
задната част



Изхвърлете маската в  
кошче с капак без да  
докосвате предната част



[www.responsaprevent.bg](http://www.responsaprevent.bg)

## КОГА ДА НОСИМ МАСКА?



При кашлица, кихане,  
температура или  
други грипоподобни  
симптоми



Ако сте в контакт  
с болен човек



Ако сте медицинско  
лице и работите в зона  
с висок риск



По препоръка на  
оторизиран здравен орган